



Tekutý dezinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů a KAS, vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků postřikem.

**Rychlý
dezinfekční
účinek**

desprej®

Naše Plus

- K okamžitému použití
- Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
- Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
- Dobrá materiálová snášenlivost
- Kompatibilní s utěrkami Wettask a schülke wipes

Oblast použití

desprej® je vhodný k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.) . Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako např.

- povrchy v blízkosti pacientů
- kontaktní plochy
- vyšetřovny
- operační stoly a okolní plochy
- zdravotnické prostředky

Účinnost

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desprej® se neředí a aplikuje se koncentrovaně pomocí postřiku, případně otěru. Povrch důkladně smočte roztokem a nechte jej působit po dobu expozice. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).



Složení

100 g přípravku **desprej®** obsahuje následující účinné látky:

- 45 g Ethanol
- 30 g Isopropanol
- 0,5 g Didecyldimethylammonium chloride

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a přímého slunečního záření. Teplota skladování: -10 až +25 °C.

Doba expirace: 36 měsíců

Související přípravky

- mikrozid® AF liquid

Životní prostředí

Společnost schulke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.