

# schülke -+



Tekutý bezalkoholový dezinfekční přípravek určený k rychlému čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků citlivých na alkohol.

Na citlivé  
povrchy

## desprej<sup>®</sup> sensitive

### Naše Plus

- Šetrná dezinfekce
- Vhodný i na citlivé materiály
- Velmi rychlý účinek
- Ihned k použití
- Jemně parfemován příjemnou vůní

CE 1023

### Oblast použití

**desprej<sup>®</sup> sensitive** je vhodný pro oblast zdravotnictví, ordinace lékařů, ústavy sociální péče, domácí péči a obecnou praxi. Vhodný na zdravotnické prostředky, přístroje a pomůcky z plastů a plexiskel (inkubátory, displaye, UZV sondy, klávesnice, monitory atd.). Výborný pro ošetření špatně dostupných míst a všude tam, kde je nutno zajistit rychlý dezinfekční efekt. Vhodný i do systému suchých utěrek schülke wipes.

### Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní (BVDV/Vaccinia/MVA), mykobaktericidní.

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

Předem odstraňte hrubé nečistoty. Aplikujte přípravek postříkáním tak, aby byl povrch rovnoměrně a zcela smočen. Nechte přípravek účinkovat po dobu požadované mikrobiologické účinnosti. Poté přebytečnou vlhkost setřete jednorázovou utěrkou.

Lesklé povrchy a povrchy obrazovek setřete po době expozice dosucha čistou a suchou jednorázovou utěrkou. Při ošetřování zdravotnických prostředků dbejte na pokyny výrobce. Není určen pro dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.



# desprej<sup>®</sup> sensitive

## Složení

100 g přípravku **desprej<sup>®</sup> sensitive** obsahuje následující aktivní látky:

- 0,02 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 0,05 g Poly(hexametylenbiguanid) hydrochlorid
- 0,05 g Didecylmethylamonium chlorid

## Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nevhodný na materiály ze silikonu, barevných kovů (měď, mosaz, hliník, zinek), gumy, měkčeného PVC a polyamidu.

Doba expirace: 24 měsíců

## Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desprej sensitive 500 ml	20/Karton	70000072
Desprej sensitive 5 kg	1/Kanistr	70000073

## Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

## Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.



Člen skupiny Air Liquide-Group

Výrobce  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com